
 <p>Prefeitura de Porto Alegre SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM</p>	
<p>Data Emissão: 04/2023</p>	<p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 11</p> <p>LIMPEZA DAS ALMOTOLIAS</p>	<p>Próxima Revisão 2024</p>
<p>Elaborado: Enfermeiras Distritais</p>	<p>Revisado:</p> <p>Rafaela Bernardes Escouto Enfermeira/COREN/RS 0165006</p> <p>Mara Regina Costa Téc. Enf./COREN/RS 0426113</p> <p>Patrícia Almeida Maicá Téc. Enf./COREN/RS 0657470</p> <p>Vanessa Severo Coffy Enfermeira/COREN/RS 110074</p>	<p>Aprovado:</p> <p>Comitê de Enfermagem</p> <p>Leonardo Rodrigues Enfermeiro/COREN/RS0524245</p> <p>Direção da APS</p>

DEFINIÇÃO: Processo de remoção física por ação mecânica de sujidades das superfícies das almotolias que deverá ser realizado no término da solução e/ou no máximo a cada 07 dias.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Equipe de enfermagem e equipe de saúde bucal.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de lavagem de materiais

REGISTRO DO PROCEDIMENTO: Não se aplica

MATERIAL NECESSÁRIO:



- EPI (avental, touca, máscara, óculos e luvas de autoproteção);
- 01 esponja macia de limpeza;
- 01 escova cilíndrica tamanho aproximado de 15 cm;
- Solução de água e detergente;
- Compressas ou panos limpos e secos;
- Balde ou bacia com tampa;
- Hipoclorito de sódio a 1%;
- Pinça longa;

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

- Esvaziar as almotolias desprezando a solução na pia;
- Lavar externamente, incluindo a tampa, com solução de água e detergente usando a esponja de limpeza;
- Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente;
- Colocar as almotolias e tampas para escorrer sobre o pano limpo e seco, até secarem completamente;
- Reabastecer para o uso semanal;
- Rotular com descrição do produto, lote, data do envase e validade;
- Trocar frascos de almotolia conforme estado de conservação e/ou desgaste dos mesmos.

Observações:

A quantidade de solução colocada nas almotolias deve ser suficiente apenas para uso diário ou

 <p>Prefeitura de Porto Alegre SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM</p>	
--	--	---

semanal;

Nunca reabastecer as almotolias sem limpeza e desinfecção prévia;

Se for utilizado o ácido peracético, retirar os materiais do balde com o auxílio da pinça;

O profissional responsável deve sempre avaliar as condições da almotolia e seu funcionamento antes de desprezá-la.

Atribuições específicas do Enfermeiro:

- Assegurar limpeza adequada das almotolias;
- Garantir cumprimento da rotina.

RESULTADO ESPERADO:

- Regular o fluxo e as rotinas para a troca e manutenção das soluções antissépticas estéreis na área cirúrgica;
- Realizar a limpeza e desinfecção das almotolias após término e/ou semanalmente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

http://www.fcecon.am.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/POP-Lavagem-de-Almotolias-CCIH-LA_63.p df – acesso em 17/04/2023 às 17hs;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 19 – LIMPEZA DAS ALMOTOLIAS - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS DE PORTO ALEGRE, OUTUBRO DE 2021