
 <p>Prefeitura de Porto Alegre SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM</p>	
<p>Data Emissão: 04/2023</p>	<p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 47 LIMPEZA DO CABO E DA PINÇA DO ELETRO-ESTIMULADOR</p>	<p>Próxima Revisão 2024</p>
<p>Elaborado: Rafaela Bernardes Escouto Enfermeira/COREN/RS 0165006 Mara Regina Costa Téc. Enf./COREN/RS 0426113 Patrícia Almeida Maicá Téc. Enf./COREN/RS 0657470 Vanessa Severo Coffy Enfermeira/COREN/RS 110074</p>	<p>Revisado: Vanessa Severo Coffy Enfermeira/COREN/RS 110074 Leonardo Rodrigues Enfermeiro/COREN/RS0524245</p>	<p>Aprovado: Comitê de Enfermagem Leonardo Rodrigues Enfermeiro/COREN/RS0524245 Direção da APS</p>

DEFINIÇÃO: Eletroestimuladores são aparelhos que usam pequenos choques elétricos para complementar treinos, recuperar lesões, diminuir celulites. Os procedimentos operacionais padronizados (POPs) têm como objetivo estabelecer regras para a correta utilização dos equipamentos e materiais visando garantir a segurança e o bom andamento das práticas.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Centros de especialidades

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Equipe de Enfermagem

REGISTRO DO PROCEDIMENTO: Não se aplica

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

- Receber o cabo e a pinça da área cirúrgica ou da equipe médica;
- Colocar o cabo em imersão em detergente enzimático conforme rotina já estabelecida e realizar posteriormente a lavagem;
- Não colocar em imersão as pontas;
- Realizar a higienização das pontas com gaze umedecida em enzimático, secar com ar comprimido e em seguida friccionar com uma gaze levemente umedecida com álcool 70 %.
- Secar o cabo com compressa limpa e ar comprimido e passar álcool 70%;
- Embalar o cabo em plasteril e identificar com etiqueta específica (data do processamento e data de validade);
- Embalar a pinça monopolar/bipolar em plasteril e processar em ciclo de 15 minutos;
- Disponibilizar o pacote na prateleira dos materiais.

Observações: Enfermeiro: Gerenciar o processamento do material médico assegurando o processo de higienização e identificação adequada.

RESULTADO ESPERADO:

- Realizar a limpeza do cabo e da pinça monopolar/bipolar para o próximo uso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO nº 21 – LIMPEZA DA PINÇA E CABO ELETRO-ESTIMULADOR - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS DE PORTO ALEGRE, OUTUBRO DE 2021